

Arthroscopy Limb Positioners



LIMB POSITIONERS
for KNEE, DISTAL EXTREMITIES
and SHOULDER

Arthrex® 

KNEE POSITIONING

LOW PROFILE LEG HOLDER

LOW PROFILE LEG HOLDERは、ベルクローライニングにフォームクッションを取り付けるよう設計されており、内反・外反操作時または下肢内旋外旋時に大腿部を確実にコントロールすることができます。

AR-1500 レッグホルダー

AR-1502 レッグホルダー フォームクッション

UNIVERSAL LIMB POSITIONER

UNIVERSAL LIMB POSITIONER (William E. Nordt, M.D. [ヴァージニア州リッチモンド]との共同設計) は、関節鏡視下手術や大腿骨ネイリング、膝全置換術、大腿・脛骨骨折治療のようなオープンサージェリーに使用することが可能です。

プラスチック製水平ポストはX線透過性で、術中X線撮影にも対応します。ポストには使い捨てパッドが付いており、安全な後方膝関節支持が得られます。

パッド付き垂直ポストは簡単に取り付けられ、膝関節に様々な応力を加えることが可能です。

AR-1520 ユニバーサルリムポジショナー



Tibial Position




Ankle Position



Lateral Post Position



Figure 4 Position

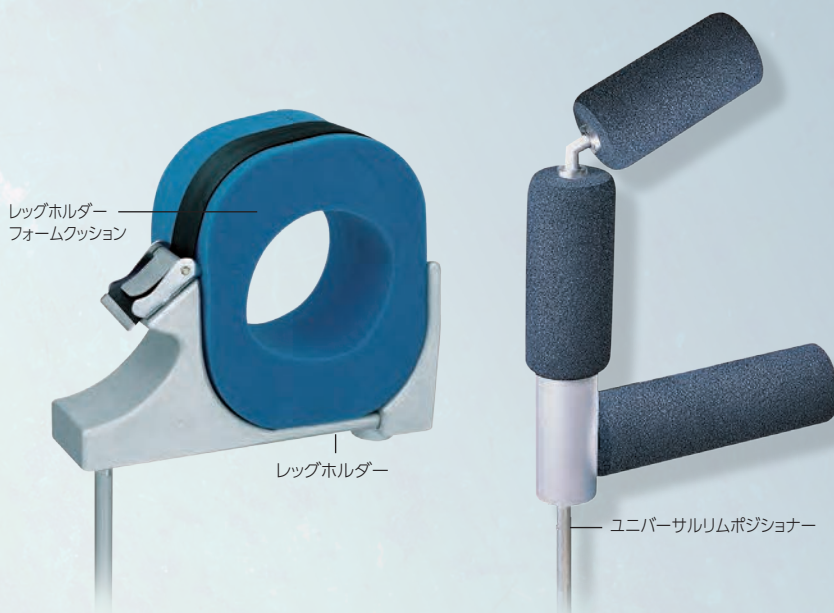

SMALL JOINT HOLDERS

スモールリムホルダー
フォームクッション



スモールリムホルダー

SMALL JOINT LIMB HOLDER

SMALL JOINT LIMB HOLDER (Champl.Baker,M.D[ジョージア州コロンバス]との共同設計) は、肘関節および足関節の関節鏡視下手術またはオープンサージェリーにおいて患肢を安定させるよう設計されています。手術台に簡単に取り付けられ、高さ・幅・軸旋を調整して、視認性と下肢の安定性が得られます。内部駆血帯により、オープンサージェリーへ転換した際に視認性をコントロールすることができます。また小児の膝関節鏡視下手術にも適しています。使い捨てフォームクッションや圧迫駆血帯を用い、調節式サイドサポートで様々なサイズの四肢に適合します。

AR-1506 スモールリムホルダー

AR-1507 スモールリムホルダーフォームクッション



Elbow Arthroscopy



Pediatric Knee Arthroscopy

ANKLE DISTRACTION STRAP (AR-1712)

アングルディストラクションストラップは患肢を安全に牽引するようデザインされています。強度を有する帯状のナイロン素材とノンスリップ発泡パッドで構成されているため、快適に確実に支持する事が出来ます。本製品はフリーサイズで使いやすく、効果的な牽引力とグリップ力を得ることが出来ます。

Ankle Distractor Set

アングルディストラクターセットは簡単かつ効果的に足関節を牽引できるよう設計されています。術者は、関節鏡検査または関節鏡視下手術の際に大きなテンショニングホイールを用いて、容易に希望通りのテンションに増減することができます。テンショニングホイールをベッド横に設置する独自の設計によって、患者や患部を術者の近くに移動させることができます。Clark Rail Adapterを用いることで、アングルディストラクターの装着と適度なテンション調節が簡単にできます。スモールリムホルダーとアングルストラップを併用することで、有用な関節鏡手術用セットが完成します。アングルディストラクターセットにはアングルディストラクションストラップを併用することができます。強度を有する帯状のナイロン素材とノンスリップ発泡パッドで構成されているため、快適性に優れ、患肢を安全に支持します。本製品はフリーサイズで使いやすく、効果的な牽引力とグリップ力を得る事ができます。

アングルディストラクター セット構成品

AR-1713-01	アングルディストラクター
AR-1713-02	AD クイックリリース ポスト
AR-1713-03	AD Sterilizableクランプ
AR-1713C	アングルディストラクター滅菌ケース

オプション

AR-1713-04	AD テンションメータ
AR-1506	スモールリムホルダー
AR-1507	スモールリムホルダー フォームクッション

ディスプレイザブル品

AR-1712	アングルディストラクターストラップ
----------------	-------------------

アングルディストラクターストラップ



アングルディストラクター

WRIST TRACTION

WRIST TRACTION TOWER

WRIST TRACTION TOWER (David M. Auerbach, M.D [南カリフォルニア整形外科研究所]との共同設計) は、手関節鏡視下手術において術者がアクセスしやすい位置に上肢を保持するための装置です。

タワーは滅菌済フィンガートラップを用いて手指を牽引します。上腕のカウンター牽引ポストは、ピンを用いる骨折部閉鎖整復または外固定などの手術において、手関節を伸延し肢位を保ちます。

手関節牽引タワーは、TFCC (三角線維軟骨複合体)、靱帯および骨の損傷を治療する際に手関節鏡視下手術で用いることができます。またハンドスタビライザーポストによって手関節を完全回内から完全回外まで保持できるため、様々な手術に対応することができます。

AR-1611S	リストトラクションタワー
AR-1614	フィンガーディストラクションアタッチメント
AR-1615	リストタワー用フォームインサート
AR-1616-S (滅菌済)	フィンガートラップ スモール
AR-1616-M (滅菌済)	フィンガートラップ ミディアム
AR-1616-L (滅菌済)	フィンガートラップ ラージ
AR-1617 (滅菌済)	リストトラクションタワー用ハンドパッド



SHOULDER POSITIONING

3-POINT SHOULDER DISTRACTION SYSTEM AND STAR SLEEVE

3-POINT SHOULDER DISTRACTION SYSTEM (Stephen J. Snyder, M.D.[カリフォルニア州ヴァンナイズ]との共同設計) は用途が広く、側臥位で施行する様々な種類の関節鏡視下またはオープンな肩関節手術において、安全かつ有効な肢位を得ることができます。

術中に肢位の調整が可能で、色分けされたケーブル端部の重りを換えるだけで遠位および外側への牽引がコントロールされます。また、外転角度も調整できます。

滅菌包装されたSTAR (肩関節牽引・回旋用) スリーブは、上肢の牽引および回旋を安全にコントロールすることができます。助手の手を煩わせず外側ベルクロストラップを調整するだけで内転または外転をコントロールします。

AR-1600M	アームホルダー
AR-1606V (滅菌済)	STARスリーブベルクロ
AR-1606SV (滅菌済)	STARスリーブスモールベルクロ



SHOULDER POSITIONING

TRIMANO SUPPORT ARM (AR-1640)

TRIMANO SUPPORT ARMは関節鏡視下やオープンサージェリーでのビーチチェアポジションの際に患者の腕を医師が望む位置に安全に且つしっかりと固定します。

コンパクトで軽い装置は取り付けがしやすく、緊急時にもすぐに使うことが可能です。電気や空気の供給も必要ありません。

ハンドル部分を握ることによって患者の腕を動かしたり、固定したりできます。

TRIMANO Beach Chair Kitとしてディスプレイのビーチチェアホルダーと固定用テープ、TRIMANO本体用カバーがセットとなってパッケージされており、清潔野にて操作することが可能です。



サポートアーム

AR-1640	サポートアーム
AR-1641	アダプター
AR-1644	ディスプレイキット
AR-1646	TRIMANO ディスプレイキット (エルボー用)
AR-1647	TRIMANO アトラウマティック ハンドホルダー
AR-1648	TRIMANO ドレープ
AR-3210-0010	TRIMANO カメラヘッドホルダー
AR-1600-50	アームホルダー 瑞穂用アダプター



TRIMANO
アトラウマティック ハンドホルダー



TRIMANO
カメラヘッドホルダー



アダプター



ディスプレイキット



TRIMANO ドレープ



TRIMANO ディスプレイキット
(エルボー用)



SHOULDER POSITIONING



LPSアームサポート



UniversalヘッドポジショナーDisposable



カウンター牽引ストラップ

BEACH CHAIR POSITIONER SYSTEM

BEACH CHAIR POSITIONER SYSTEMは肩関節鏡視下手術やオープンサージェリーにてビーチチェアポジションをとるのに有用です。Universalヘッドポジショナーによって首をしっかり固定する事ができ、またカウンター牽引ストラップを使用することで体幹の外側支持が得られるため、肩パネルを外して患側の肩を安全かつ十分に露出させることができます。

AR-1627	ビーチチェア ポジショナー
AR-1627-01	LPSアームサポート
AR-1627-03	カウンター牽引ストラップ
AR-1627-05	UniversalヘッドポジショナーReusable
AR-1627-06	UniversalヘッドポジショナーDisposable
AR-1627-12	Easy Lockソケット
AR-1627-13	ビーチチェア カート
AR-1627-11-AJ	ビーチチェアークランプ 瑞穂用アダプター



ビーチチェア ポジショナー

販売名:体位固定器
届出番号:13B1X10093E22001
販売名:手術台アクセサリ
届出番号:13B1X10093130004
販売名:アースレックス TRIMANOサポートアーム
届出番号:13B1X10093110005
販売名:Arthrex ビーチチェア
届出番号:13B1X10093120004

■ 製造販売元


Arthrex Japan 合同会社

〒163-0828
東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル28F
TEL: 03-4578-1030 FAX: 03-4578-1039

● 改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

■ 代理店