

GraftNet™ XL Bone Collection Device

Surgical Technique for Spine Applications



Arthrex® 

GraftNet™ XL Bone Collection Device

Simplified Autologous Bone Graft Collection

GraftNet XL デバイスは、自家骨移植片の収集を最大化するよう設計されており、大容量のメッシュ式フィルターを使用して、患者自身の組織を容易に手技に取り込めるようにしています。



Technique



GraftNet XL のサクシオンチューブコネクタを、使用するハンドピースまたはフレイザーサクシオンデバイスに接続します。

GraftNet XL デバイスのアウトフローアダプターに、サクシオンチューブを接続します。




必要な量の自家組織が採取できるまでリセクションを行います。切除された自家組織は、GraftNet XL デバイスの内部フィルター内に回収されます。



3

自家組織の採取が完了したら、デバイスをサクションから外し、キャップをロック位置からアンロック位置へ回して、インナーフィルターを取り外します。

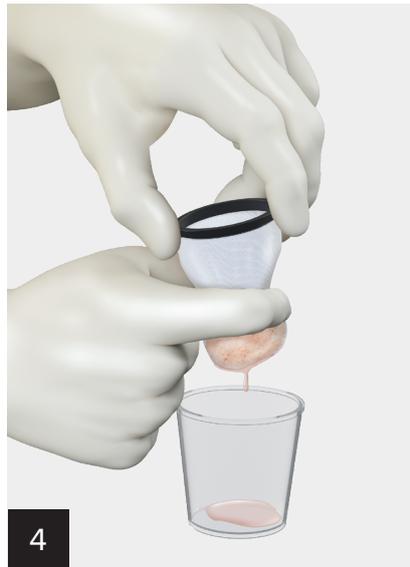

4

収集した自家組織に余分な液体が含まれている場合は、メッシュフィルターを軽く絞るか、滅菌済みの吸収パッドを使用して除去することができます。



5

フィルターを反転させて自家組織を取り出し、滅菌済みの容器に移してください。フィルターに残った自家組織は、剥離子等を使用して追加で回収することができます。

Potential Applications



GraftNet™ XL デバイスは、椎弓切除術（ラミネクトミー）や開頭術（クラニオトミー）など、自家骨を採取して再建または修復に再利用したいあらゆる手技で骨を収集するために使用できます。インフローおよびアウトフロー側に設けられたユニバーサルアダプターにより、GraftNet XL デバイスは脊椎外科や脳神経外科のあらゆる手技に迅速に組み込むことが可能です。

Ordering Information

GraftNet™ XL Bone Collection Device

製品番号	製品名	包装単位	医療機器承認等番号
ABS-1052	GraftNet XL ボーンコレクションデバイス	1	13B1X10093190003

販売名	承認等番号	一般的名称	規制区分	機能区分
GraftNet XL ボーンコレクションデバイス	13B1X10093190003	骨粉収集器	クラスI	非該当

製造販売元

Arthrex Japan 合同会社

〒163-0828 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル28F
LT7-000294-ja-JP

● 改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

